


Paciente varón de 27 años


Procedimientos Quirúrgicos del caso:

- **ETAPA 1: OSTEOTOMIA DE LE FORT**
- **ETAPA 2: OSTEOTOMIAS SAGITALES BILATERALES (BSSO)**
- **ETAPA 3: MENTOPLASTIA**

POSICIÓN PREOPERATORIA TEJIDOS BLANDOS

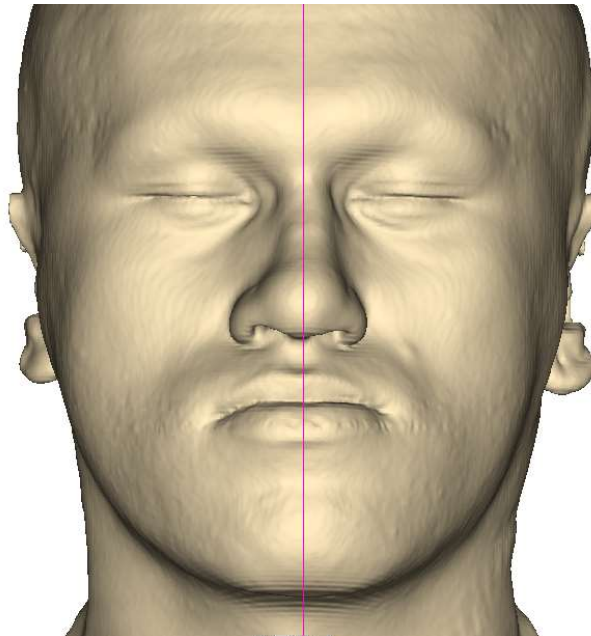

Vista Anterior


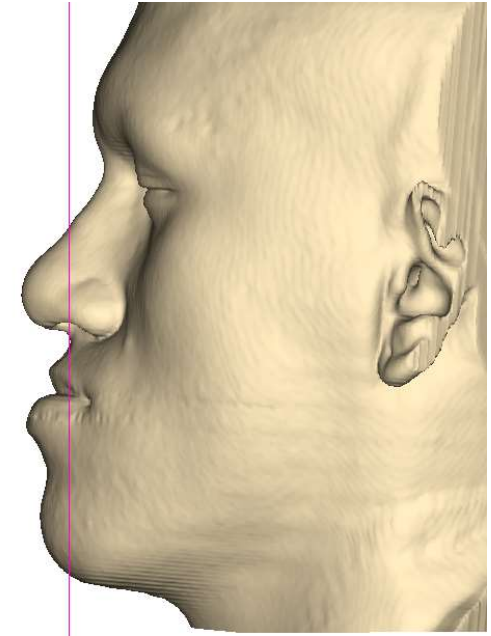


Vista Lateral Izquierda

ETAPA 1: MOVIMIENTO DEL MAXILAR – LE FORT

LISTA DE MOVIMIENTOS

A	Traslación 4mm a la izquierda
B	Corrección del canteo derecho 1 mm
C	Avance de 5 mm
D	Corrección YAW 2º en sentido horario

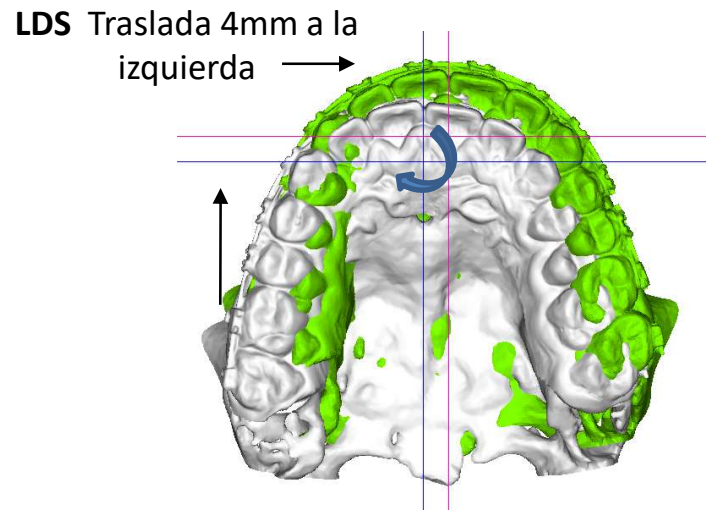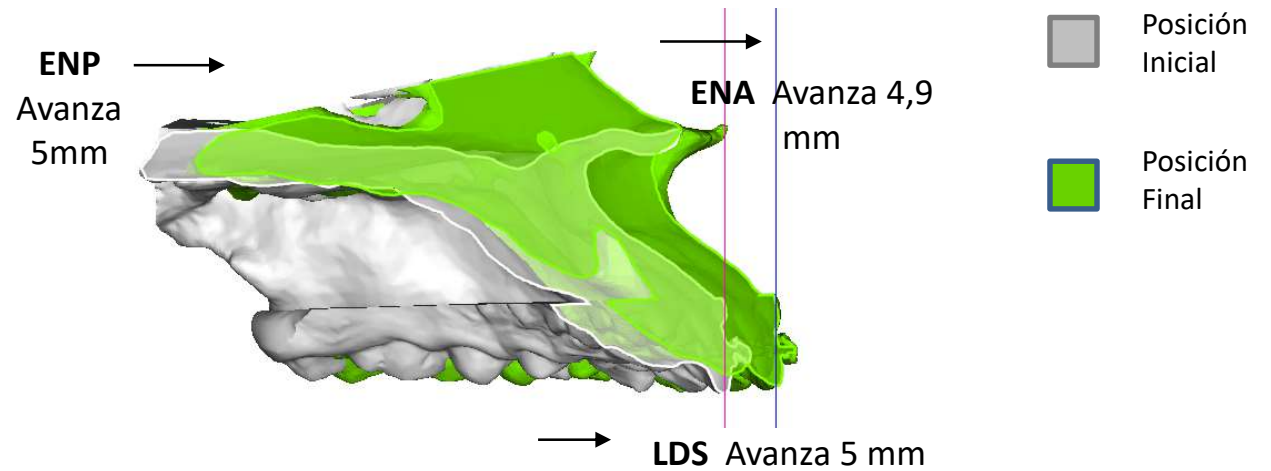


Maxilar	←POSTERIOR+ / ANTERIOR-	↑ARRIBA+ / ABAJO-	← DERECHA+ / IZQUIERDA-
ENA	-4,9 →	0,4 ↑	-4,4 →
ENP	-5,0 →	0,5 ↑	-2,4 →
Línea Dental Superior	-5,0 →	0,5 ↑	-4,0 →
Canino Derecho (13)	-5,7 →	1,0 ↑	-3,7 →
Canino Izquierdo (23)	-4,3 →	-0,1 ↓	-3,7 →
Molar Derecho (16)	-6,0 →	1,2 ↑	-2,9 →
Molar Izquierdo (26)	-4,0 →	-0,3 ↓	-2,9 →

ETAPA 1: MOVIMIENTO DEL MAXILAR – LE FORT


LISTA DE MOVIMIENTOS

A	Traslación 4mm a la izquierda
B	Corrección del canteo derecho 1 mm
C	Avance de 5 mm
D	Corrección YAW 2º en sentido horario

COMPARATORIA MAXILAR INICIAL – MAXILAR FINAL

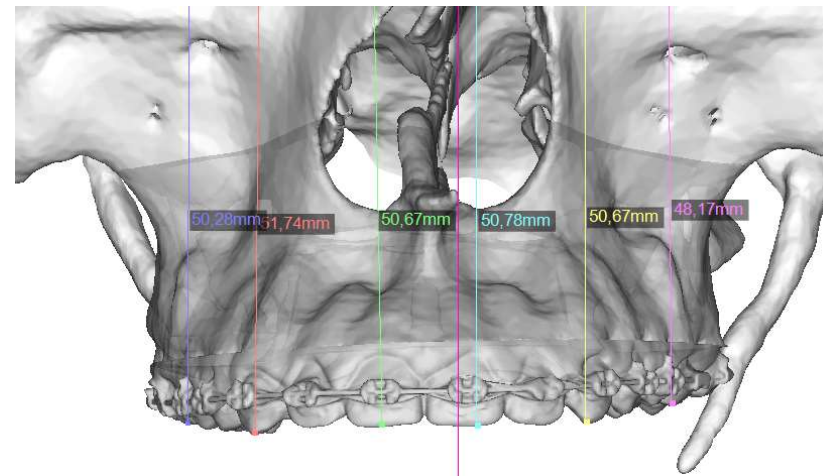

Posición Inicial

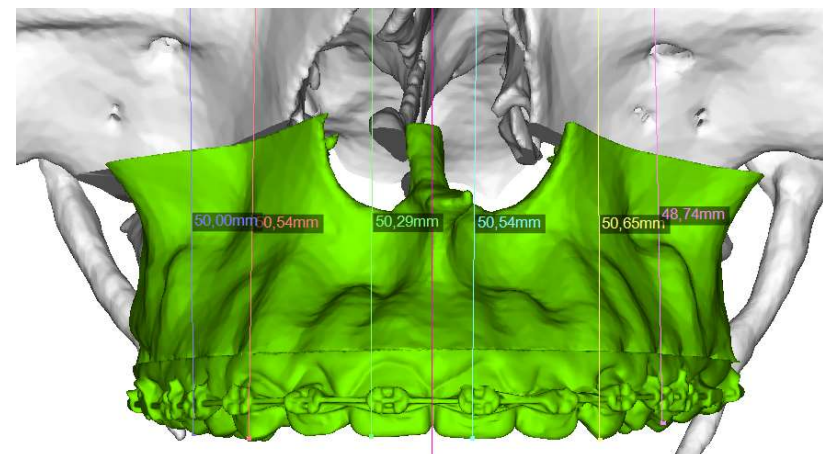

Posición Final

ETAPA 1: OSTEOTOMÍA LE FORT



Diseño y fabricación de la guía de corte Le Fort

Los orificios de fijación de la guía coinciden con los orificios de fijación de las placas de titanio.

Guía de corte Le Fort

Fijación Con tornillos
2,0X9mm *

Línea corte

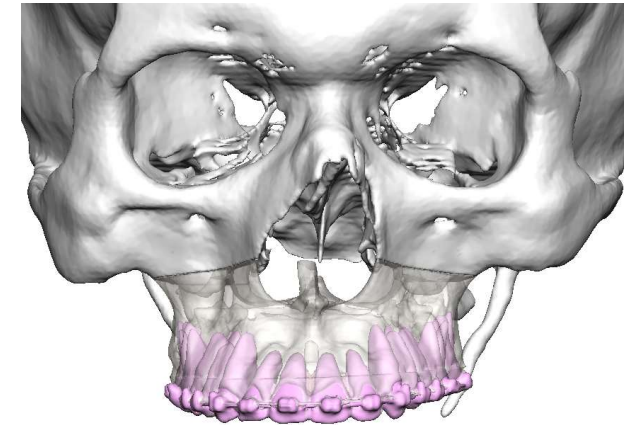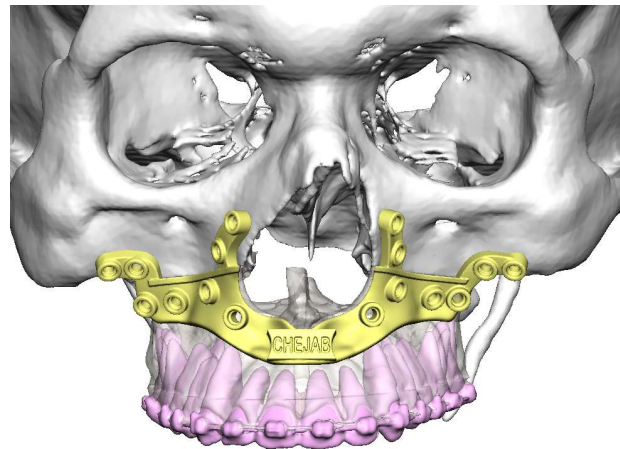


Vista Anterior


ETAPA 1: MOVIMIENTO DEL MAXILAR LE FORT

Diseño y fabricación de la guía de posicionamiento Le Fort


Guía Intermedia posicionamiento

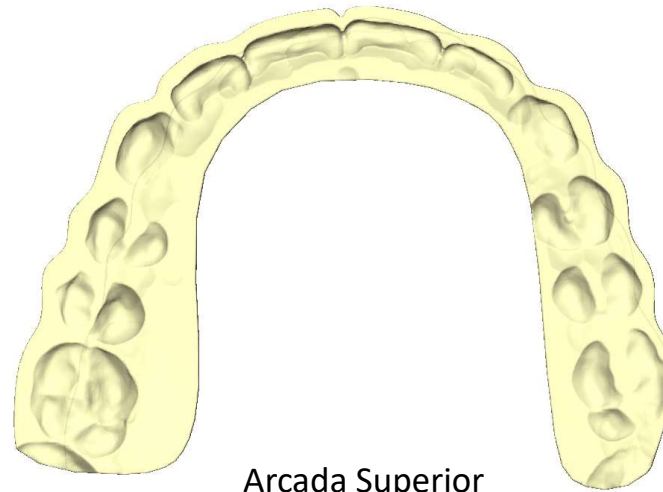

Arcada Superior

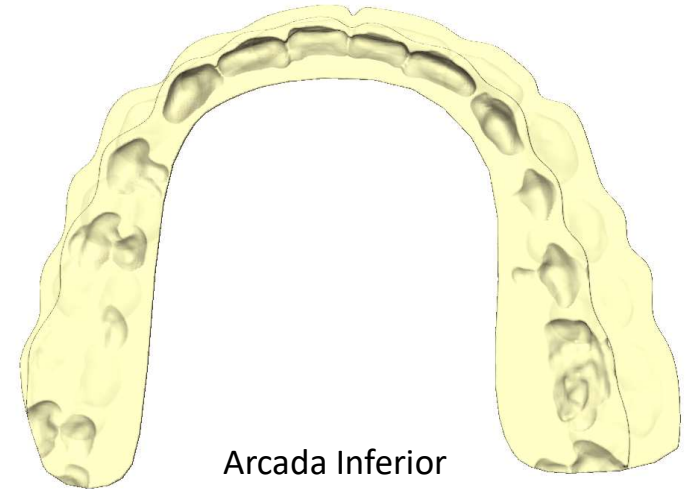



Arcada Inferior

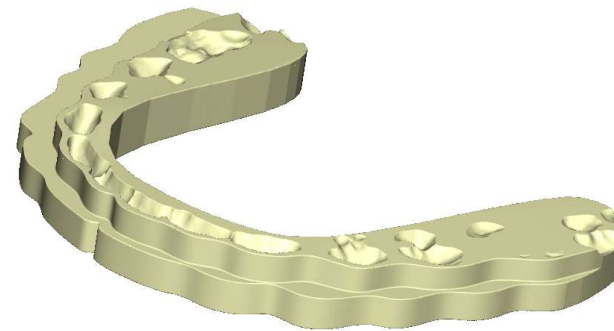



ETAPA 1: MOVIMIENTO DEL MAXILAR LE FORT

Diseño y fabricación de la guía de posicionamiento Le Fort

Guía Intermedia posicionamiento

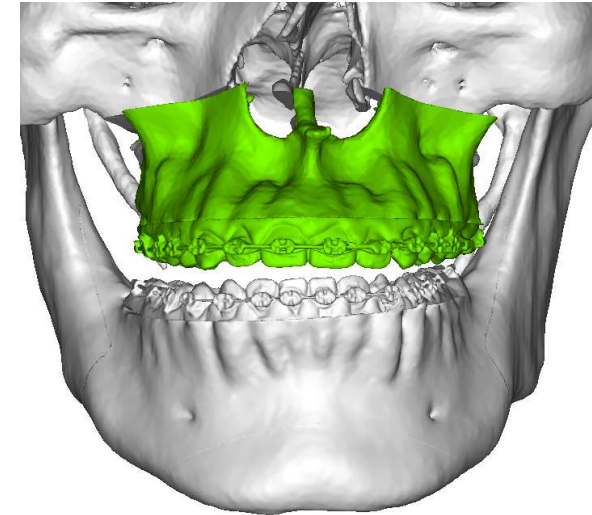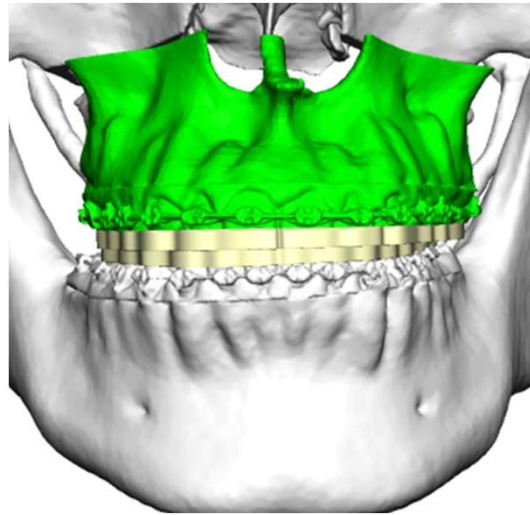

Vista Anterior

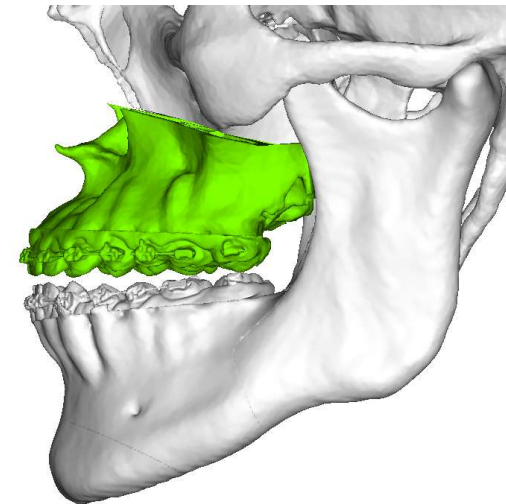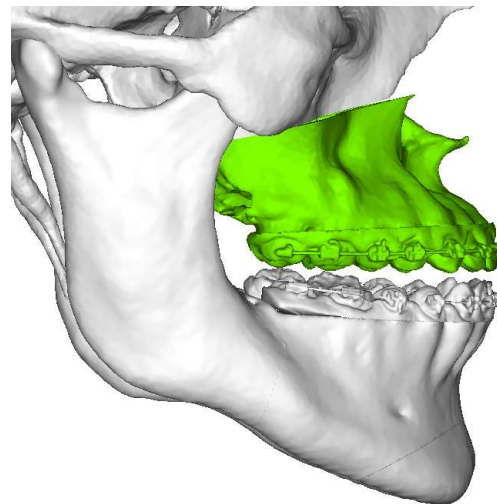


Vistas Laterales

ETAPA 1: MOVIMIENTO DEL MAXILAR LE FORT



Diseño y fabricación de las placas de osteosíntesis a medida

Placas de Osteosíntesis



Placa derecha Le Fort

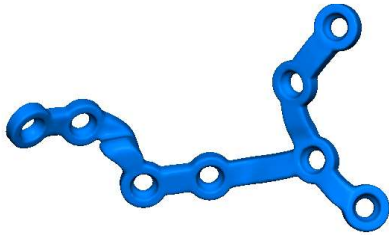

Placa izquierda Le Fort

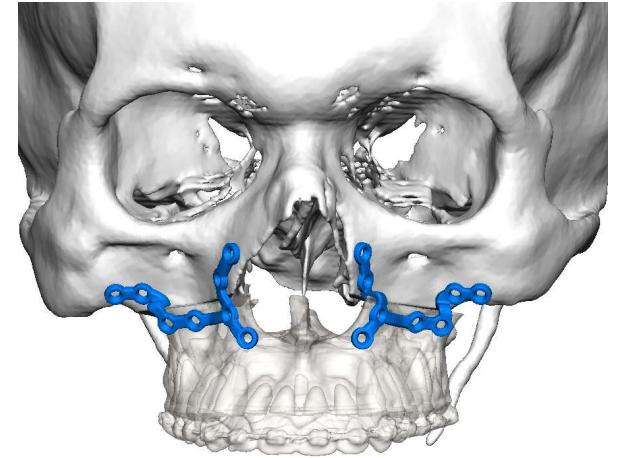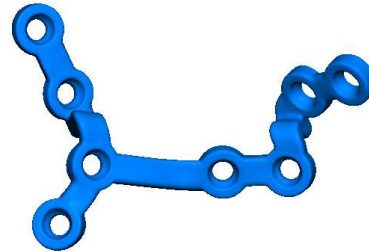

Vista Anterior

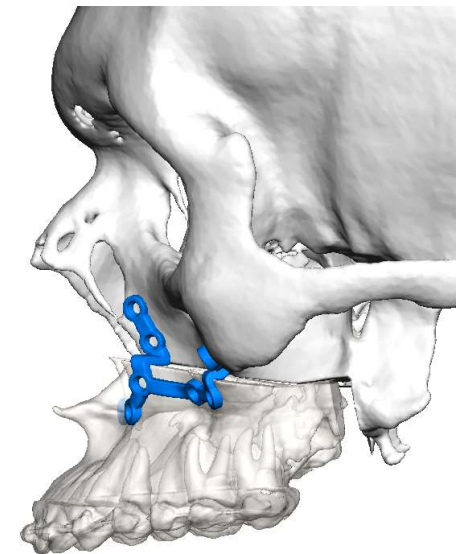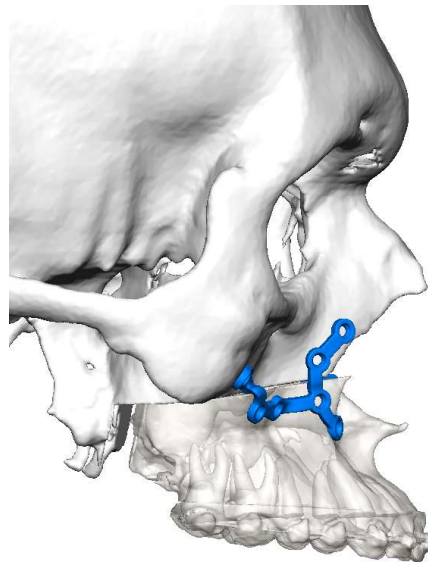

Vistas Laterales